


Jalosome[®] SOOTHING GEL

L'ENHANCEMENT TRANSDERMICO
PER RISOLVERE LE INFIAMMAZIONI
CUTANEE ED ELIMINARE
IL DOLORE ASSOCIATO

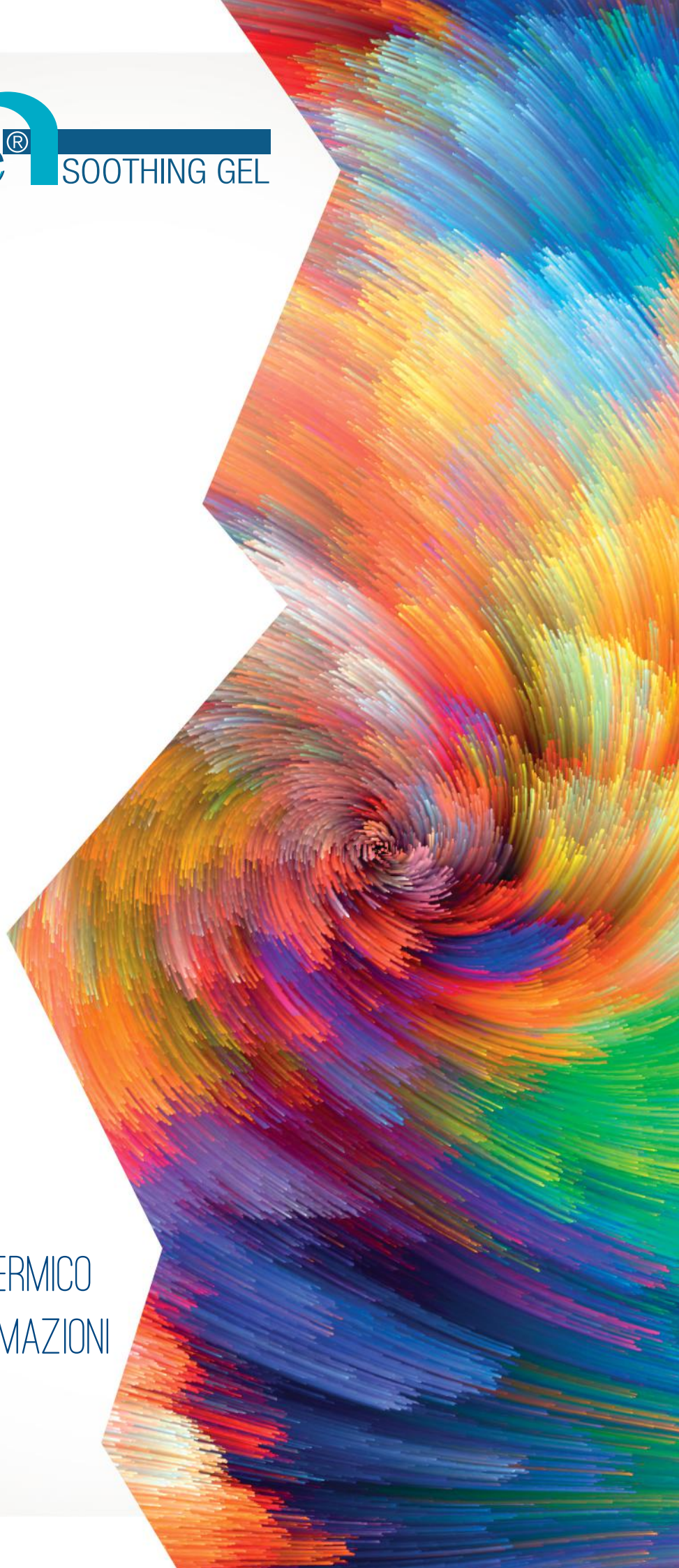

Descrizione

Sospensione vescicolare in gel idrofilo di media viscosità indicato per il trattamento delle lesioni cutanee da radioterapia e per la riduzione del dolore ad esse associato JALOSOME® Soothing gel è costituito da liposomi, microstrutture vescicolari che, facilitando la penetrazione dello stratum corneus da parte delle diverse componenti, ne permettono una miglior azione, favorendo il processo rigenerativo della cute e il controllo della sintomatologia dolorosa.

Composizione

Acqua, N-Acetyl-L-Carnitina cloridrato, Allantoina, Glicerina, fosfatidilcolina idrogenata, ialuronato di sodio (1700 Kda), ialuronato di sodio (200-400 Kda), Fenossietanolo.

Categoria di appartenenza

Dispositivo medico di Classe IIa

Meccanismo d'azione

JALOSOME® Soothing gel è costituito da sette componenti, ognuna con una funzione specifica volta a conferire l'unicità della formulazione. In particolare, JALOSOME® Soothing gel è composto da un gel di acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare, in cui sono disperse delle micro-formazioni vescicolari, essenzialmente costituite da doppi strati di fosfatidilcolina. La loro funzione è quella di veicolare le altre componenti attraverso gli strati superficiali della pelle e, in particolare, attraverso lo strato corneo che costituisce la principale barriera alla permeazione cutanea. L'allantoina è nota per la sua azione cheratolitica e ri-epitelizzante, nonché per la capacità di stimolare la proliferazione dei fibroblasti. Grazie ad una funzione anti-infiammatoria e anti-irritante, coadiuva il processo di riduzione del dolore e riduce gli arrossamenti cutanei. L'acetil-L-carnitina è nota, oltre che per favorire la rigenerazione tissutale, anche per le sue proprietà antiossidanti. L'inibizione del rilascio di glutammato a livello delle sinapsi, ha reso questa molecola una delle opzioni d'elezione per il trattamento del dolore neuropatico periferico. L'uso topico, seppur ancora in fase di studio, sembra avere un'azione sinergica sul controllo della sintomatologia dolorosa. Infine, l'acetil-L-carnitina è anche responsabile di conferire al prodotto l'idoneo valore di pH acido, necessario ad esplicare la sua azione. Grazie, quindi, alle sue caratteristiche peculiari, JALOSOME® Soothing gel è particolarmente indicato in caso di infiammazioni cutanee, quali dermatiti da radio e chemioterapia, ove può coadiuvarne la risoluzione.

Indicazioni d'uso

Attivo nel trattamento delle lesioni cutanee. Indicato in radiodermatiti, dermatiti, infiammazioni cutanee in genere, manifestazioni eritematose che coinvolgono la cute in qualsiasi distretto corporeo e che provocano dolore.

Posologia e modo di somministrazione

Un'erogazione del dispositivo airless – corrispondente a 0.2g di gel – è sufficiente per trattare una superficie pari a 16 cm² di cute. Applicare la quantità ritenuta necessaria in base all'estensione della lesione e massaggiare delicatamente al fine di spalmare uniformemente il prodotto; dopo qualche minuto nessun residuo sarà presente. Applicare due volte al giorno fino alla risoluzione del problema, salvo diversa prescrizione medica.

Controindicazioni

Non sono note controindicazioni.

Avvertenze speciali e precauzioni

Evitare l'uso se è nota un'allergia ai componenti. In caso di sensibilizzazione sospendere il trattamento e consultare il medico. Dopo l'uso non disperdere nell'ambiente. Non ingerire.

Interazioni con medicinali e altre forme d'interazione.

Nessuna interazione nota.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno, prima di utilizzare il prodotto chiedi consiglio al medico o al farmacista.

Effetti indesiderati

Nessun effetto indesiderato noto. Evitare l'impiego del prodotto se è nota un'allergia ai componenti.

Incompatibilità

Nessuna incompatibilità nota. Per una miglior efficacia del prodotto, si sconsiglia l'uso di altre soluzioni idratanti precedentemente, in concomitanza o posteriormente all'impiego di JALOSOME® Soothing gel.

Periodo di validità

Il prodotto ha una validità di 35 mesi dalla data di produzione a confezione integra. Una volta aperto, il singolo flacone deve essere utilizzato entro 7 giorni dall'apertura.

Particolari precauzioni per la conservazione

Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo da fonti di calore, luce e umidità.

Natura e capacità del contenitore

Airless da 10 ml.



Maggio 2020

Codice:	Descrizione:	Confezione di vendita:
95810	JALOSOME® 1 airless: 10ml 1 dispenser: 20 airless	1 scatola: 8 dispensers
95810F	JALOSOME® 1 airless: 10ml 1 dispenser: 4 airless	1 scatola: 28 dispensers



Welcare Industries S.p.A.

Sede legale:

Via San Giovanni sul Muro 18,
20121 Milano

Sede produttiva:

Via dei Falegnami 7, 05018 Orvieto (TR)
www.welcareindustries.com

WELCARE
Esperti della Pelle - Alleati della Natura