

Jalosome[®] Soothing Gel

Efficace per lesioni della cute da chemio e radioterapia



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

Sospensione vescicolare in gel idrofilo di media viscosità indicato per il trattamento delle lesioni cutanee da radioterapia e per la riduzione del dolore ad esse associato.

JALOSOME[®] Soothing gel è costituito da liposomi, microstrutture vescicolari che, facilitando la penetrazione dello stratum corneus da parte delle diverse componenti, ne permettono una miglior azione, favorendo il processo rigenerativo della cute e il controllo della sintomatologia dolorosa.

La linea Jalosome include anche JALOSOME[®] Hydrating Cream, dispositivo medico brevettato, particolarmente indicato per contribuire ai processi di riparazione tissutale.

INDICAZIONI D'USO:

- Attivo nel trattamento delle lesioni cutanee.
- Indicato in radiodermiti, dermatiti, infiammazioni cutanee in genere, manifestazioni eritematose che coinvolgono la cute in qualsiasi distretto corporeo e che provocano dolore.

MECCANISMO D'AZIONE:

JALOSOME[®] Soothing gel è costituito da sette componenti, ognuno con una funzione specifica all'interno della formulazione.

In particolare, **JALOSOME[®] Soothing gel** è composto da un gel di acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare, in cui sono disperse delle micro-formazioni vescicolari, essenzialmente costituite da doppi strati di fosfatidilcolina. La loro funzione è quella di veicolare le altre componenti attraverso gli strati superficiali della pelle e, in particolare, attraverso lo strato corneo che costituisce la principale barriera alla permeazione cutanea.

Ingredienti

Acido Ialuronico

Allantoina

N-Acetilcarnitina

Proprietà

Protegge la cute dall'aggressione degli elementi esterni

Favorisce i fisiologici processi di rinnovamento cellulare

Crea le condizioni per favorire i fisiologici processi di rinnovamento cellulare ed è utile per lenire la sensazione di dolore

COMPOSIZIONE:

Acqua, L-Acetyl-L-Carnitina choridroto, Allantoina, Glicerina, fosfatidilcolina idrogenata, Ialuronato di sodio (1700 Kda), Ialuronato di sodio (200-400 Kda), Fenossietanolo.

CLASSIFICAZIONE E CODICE CND:

Dispositivo Medico di Classe IIa

Codice CND: **M0499** Numero di Repertorio: **1128148**

POSOLOGIA E MODO DI SOMMINISTRAZIONE:

Un'erogazione del dispositivo airless – corrispondente a 0.2g di gel – è sufficiente per trattare una superficie pari a 16 cm² di cute. Applicare la quantità ritenuta necessaria in base all'estensione della lesione e massaggiare delicatamente al fine di spalmare uniformemente il prodotto; dopo qualche minuto nessun residuo sarà presente. Applicare due volte al giorno fino alla risoluzione del problema, salvo diversa prescrizione medica.

CONTROINDICAZIONI:

Non sono note controindicazioni.

AVVERTENZE SPECIALI E PRECAUZIONI:

Evitare l'uso se è nota un'allergia ai componenti. In caso di sensibilizzazione sospendere il trattamento e consultare il medico. Dopo l'uso non disperdere nell'ambiente. Non ingerire.

INTERAZIONI CON MEDICAMENTI E ALTRE FORME D'INTERAZIONE:

Nessuna interazione nota.

EFFETTI INDESIDERATI:

Nessun effetto indesiderato noto.

Evitare l'impiego del prodotto se è nota un'allergia ai componenti.

INCOMPATIBILITÀ:

Nessuna incompatibilità nota. Per una miglior efficacia del prodotto, si sconsiglia l'uso di altre soluzioni idratanti precedentemente, in concomitanza o posteriormente all'impiego di JALOSOME® Soothing gel.

PERIODO DI VALIDITÀ:

Il prodotto ha una validità di 35 mesi dalla data di produzione a confezione integra. Una volta aperto, il singolo flacone deve essere utilizzato entro 7 giorni dall'apertura.

PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE:

Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo da fonti di calore, luce e umidità.



CODICE:	DESCRIZIONE:	CONFEZIONE DI VENDITA:
95810	JALOSOME® Soothing gel 20 flaconi airless da 10 ml	1 scatola: 8 dispenser
95810F	4 flaconi airless da 10 ml	1 scatola: 28 dispenser

Revisione 00 2022/03

Welcare Industries S.p.A.

Sede produttiva: via dei Falegnami, 7 - 05018 Orvieto (TR)

Sede commerciale: Regus Building, piazzale Biancamano, 8 - 20121 Milano

Sede commerciale: EUR - Spaces, viale Luca Gaurico, 91/93 - 00143 Roma

Sede legale: via San Giovanni sul Muro, 18 - 20121 Milano

www.welcareindustries.com

WELCARE
Esperti della pelle - Alleati della Natura